

Reinigungshinweise für medizinische Displays

Um die optimale Leistung und Lebensdauer Ihres medizinischen Displays zu gewährleisten, empfehlen wir regelmäßige Reinigungs- und Wartungsverfahren. Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen für eine effektive Reinigung unter Verwendung von alkoholischen Reinigungsmitteln:

1. **Vorbereitung:** Schalten Sie das Display aus und trennen Sie es von der Stromquelle, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Lassen Sie das Display vollständig abkühlen, falls es in Betrieb war.
2. **Auswahl des Reinigungsmittels:** Verwenden Sie zur Reinigung des Displays ein mildes, alkoholisches Reinigungsmittel. Ethanol oder Isopropylalkohol mit einem Alkoholgehalt von mind. 70% - 90% sind geeignete Optionen. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln, die Benzole oder andere aggressive Chemikalien enthalten, welche Plastikweichmacher enthalten.
3. **Anwendung des Reinigungsmittels:** Tragen Sie das alkoholische Reinigungsmittel entweder auf ein weiches, fusselfreies Tuch auf, oder sprühen Sie mit einem Abstand von 30cm auf Display und geschlossene Flächen. Vermeiden Sie es, das Reinigungsmittel direkt in die Lüftungsschlitze zu sprühen, da dies zu Beschädigungen führen kann. Achten Sie darauf, das Tuch nicht zu durchnässen.
4. **Reinigung des Displays:** Wischen Sie das Display vorsichtig mit dem mit Reinigungsmittel getränkten Tuch ab. Achten Sie darauf, alle Oberflächen gleichmäßig zu reinigen, einschließlich des Rahmens und der Ecken. Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf das Display auszuüben, um Kratzer zu vermeiden.
5. **Trocknung:** Lassen Sie das Display nach der Reinigung an der Luft trocknen, bis das Reinigungsmittel vollständig verdunstet ist. Vermeiden Sie es, das Display während des Trocknungsprozesses wieder anzuschließen oder einzuschalten.
6. **Entsorgung des Reinigungstuchs:** Entsorgen Sie das gebrauchte Reinigungstuch gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Reinigungsmitteln und kontaminierten Materialien.

Indem Sie diese Reinigungshinweise befolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihr medizinisches Display sauber und frei von Verunreinigungen bleibt, während gleichzeitig die Integrität und Funktionalität des Geräts erhalten bleibt. Bei Fragen zur Reinigung oder Pflege Ihres Displays wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachmann.